

Patientinstruktioner

Følgende information skal gives til patienter, som får implanteret Barostim-systemet.


SÅRPLEJE EFTER OPERATION

- Forbindingen skal blive siddende, indtil lægen giver besked om andet
- Når du tager bad, skal du passe på ikke at trykke på såret eller enheden
- Du MÅ IKKE røre ved operationsstederne
- Du MÅ IKKE ligge eller trykke på IPG'en (den enhed, der er implanteret i brystet)
- Du MÅ IKKE manipulere IPG'en eller elektroden (den enhed, der er implanteret i halsen) gennem huden, da det kan beskadige enheden eller huden omkring enheden eller bevirke, at elektroden bliver koblet fra IPG'en
- Hvis du få feber, rødme, udsivning eller kraftige smerter fra operationsstederne efter 3 dage, kan det være tegn på en infektion
 - Hvis du har et eller flere af ovenstående symptomer, MÅ DU IKKE forsøge at behandle dem derhjemme, men skal kontakte din læge så hurtigt som muligt
 - Infektioner, der bliver opdaget tidligt, kan normalt behandles med antibiotika
 - Mere alvorlige infektioner kan kræve, at IPG'en og/eller elektroden bliver fjernet

GENEREL INFORMATION

- Fortsæt med medicin, kost, motion og livsstilsændring efter anvisningerne
- Hav altid patientidentifikationskortet på dig, og fremvis det ved sikkerhedsscanninger
- IPG-batteriet vil blive afladet over tid og skal udskiftes
- Opfølgende lægebesøg er nødvendige for at kontrollere, at systemet fungerer, som det skal, og hvordan du reagerer på behandlingen
- Kontakt straks din læge ved:
 - Stimulering (snurren, muskelsammen-trækninger, tale- og synkebesvær)
 - Svimmelhed, brystsmerter, vejrtrækningsproblemer, hævelse i benene
 - Usædvanligt lavt blodtryk eller puls

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER

- Kontakt lægen, hvis du skal have foretaget en medicinsk procedure:
 - Procedurer som MR-scanning, elektrokauterisering, strålebehandling, litotripsiprocedurer og ekstern defibrillering kan beskadige IPG'en
- Undgå at stoppe behandlingen midlertidigt ved at holde en afstand på mindst 15 cm (6 tommer) fra enheder med stærke elektriske felter eller magnetfelter, f.eks.:
 - Stærke magneter
 - Højtalermagneter
 - Elektriske tyverisikringsystemer (EAS systemer)
 - Svejseapparater
 - Induktionsovne
- Kontakt lægen for at få vejledning, før du bevæger dig ind i miljøer, som kan påvirke IPG'ens funktion negativt, herunder områder, hvor der er opsat advarselsskilte for at forhindre, at patienter med pacemaker går ind i dem. 
- Du MÅ IKKE manipulere IPG'en gennem huden – det kan beskadige eller frakoble elektroden fra impulsgeneratoren.
- Du MÅ IKKE manipulere sinus caroticus-elektroden gennem huden – det kan beskadige elektroden eller koble den fra IPG'en og/eller muligvis forårsage skade på sinus caroticus.

Du kan se den komplette brugsanvisning og den aktuelle udgave af informationen i dette dokument på:

www.cvr.com/ifu



CVRx, Inc.
9201 West Broadway Avenue, Suite 650
Minneapolis, MN 55445 USA
Phone: (763) 416-2840
Fax: (763) 416-2841
www.cvr.com



EC REP Emergo Europe