

# Instruções para os doentes

As informações seguintes devem ser fornecidas aos doentes que tenham implantado o Sistema Barostim.

## CUIDADOS À FERIDA NO PÓS-OPERATÓRIO

- O penso deve permanecer colocado durante o período indicado pelo seu médico.
- Deve ter cuidado ao tomar banho para evitar fazer pressão na ferida ou no dispositivo.
- NÃO toque nos locais cirúrgicos.
- NÃO faça pressão nem empurre o IPG (o dispositivo que tem implantado no peito).
- NÃO manipule o IPG nem o elétrodo (o dispositivo que tem implantado no pescoço) através da pele, uma vez que isso pode danificar o dispositivo, os tecidos à volta do dispositivo ou fazer com que o elétrodo se desligue do IPG.
- Febre, vermelhidão, corrimento ou dor intensa nos locais cirúrgicos passados 3 dias podem ser sinal de infeção.
  - Se tiver algum dos sintomas indicados acima, NÃO tente tratá-los em casa, contacte o seu médico assim que possível.
  - As infeções, quando detetadas numa fase precoce, conseguem em geral tratar-se com antibióticos.
  - As infeções mais graves podem exigir a remoção do IPG e/ou do elétrodo.

## INFORMAÇÕES GERAIS

- Continue a seguir as indicações quanto aos medicamentos, alimentação, exercício e modificações no estilo de vida.
- Tenha sempre consigo o seu cartão de Identificação do Doente e apresente-o nos terminais de segurança.
- A bateria do IPG irá descarregar-se ao longo do tempo, necessitando de ser substituída.
- As consultas de seguimento no médico são necessárias para garantir o funcionamento adequado do sistema e a resposta adequada à terapia.
- Contacte o seu médico de imediato em caso de:
  - Estimulação (formigueiro, contrações involuntárias dos músculos, dificuldade em falar ou em engolir).
  - Tonturas, dor no peito, problemas respiratórios, inchaço nas pernas.
  - Pressão arterial ou frequência cardíaca invulgarmente baixas.

## ADVERTÊNCIAS / PRECAUÇÕES

- Contacte o seu médico se tiver programada alguma intervenção médica:
  - Os procedimentos como sendo ressonância magnética (RM), eletrocautério, radioterapia, litotripsia e desfibrilhação externa podem causar danos ao IPG.
- Para evitar a interrupção temporária da terapia, mantenha-se a uma distância de pelo menos 15 cm (6 polegadas) de dispositivos com campos elétricos ou magnéticos fortes, como, por exemplo:
  - Ímanes fortes.
  - Ímanes de altifalantes.
  - Sistemas de vigilância eletrónica de artigos (detetores antirroubo).
  - Instrumentos de soldadura por arco elétrico.
  - Fornos para fundição por indução.
- Contacte o seu médico para obter orientações antes de entrar em ambientes que possam afetar adversamente o funcionamento do IPG, incluindo áreas onde estão colocados avisos de advertência para evitar a entrada de doentes com pacemaker.
- NÃO manipule o IPG através da pele — isto pode danificar ou desligar o elétrodo do gerador de impulsos.
- NÃO manipule o elétrodo do seio carotídeo através da pele — isto pode danificar ou desligar o elétrodo do IPG e/ou possivelmente causar lesões no seio carotídeo.



As instruções de utilização completas, bem como uma cópia atual da informação contida neste documento, encontram-se disponíveis em: [www.cvr.com/ifu](http://www.cvr.com/ifu)