

Pokyny pre pacientov

Pacientom, ktorým je implantovaný systém Barostim, by mali byť poskytnuté nasledujúce informácie.

POOPERAČNÁ STAROSTLIVOSŤ O RANU

- Krytie rany by malo zostať na mieste až do pokynov lekára.
- Pri kúpaní je potrebné dbať na to, aby ste sa vyhli tlačeniu na ranu alebo túto pomôcku.
- **NEDOTÝKAJTE** sa miest chirurgického zákroku.
- **NELEŽTE** ani **NETLAČTE** na IPG (pomôcka implantovaná do hrudníka).
- **NEMANIPULUJTE** s IPG ani so zvodom (pomôcka implantovaná v krku) cez kožu, pretože to môže poškodiť pomôcku, tkanivo obklopujúce pomôcku alebo spôsobiť odpojenie zvodu od IPG.
- Horúčka, začervenanie, výtok alebo silná bolesť z miest chirurgického zákroku po 3 dňoch môžu byť príznakom infekcie.
 - Ak máte niektorý z uvedených príznakov, **NEPOKÚŠAJTE** sa o domácu liečbu, čo najskôr kontaktujte lekára.
 - Včas zachytené infekcie sa vo všeobecnosti dajú liečiť antibiotikami.
 - Závažnejšie infekcie môžu vyžadovať odstránenie IPG a/alebo zvodu.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Pokračujte v užívaní liekov, diéte, cvičení a úprave životného štýlu podľa pokynov.
- Noste so sebou identifikačnú kartu pacienta a predložte ju pri bezpečnostných kontrolách.
- Batéria IPG sa časom vybije a vyžaduje výmenu.
- Potrebné sú následné návštevy lekára, aby sa zabezpečili správne fungovanie systému a odpoveď na liečbu.
- Lekára okamžite kontaktujte v týchto prípadoch:
 - stimulácia (brnenie, záškľby, ťažkosti s rečou alebo prehltním),
 - závraty, bolesť na hrudníku, problémy s dýchaním, opuchy nôh,
 - krvný tlak alebo srdcová frekvencia sú nezvyčajne nízke.

VÝSTRAHY/BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Lekára kontaktujte, ak budete absolvovať zdravotný výkon:
 - výkony, ako sú MRI, elektrokauterizácia, terapeutické ožarovanie, litotripsia a externá defibrilácia, môžu spôsobiť poškodenie IPG.
- Ak sa chcete vyhnúť dočasnému prerušeniu liečby, zdržiavajte sa aspoň 15 cm (6 palcov) od zariadení so silným elektrickým alebo magnetickým poľom, ako napr:
 - silné magnety,
 - magnety reproduktorov,
 - systém elektronického sledovania tovaru (EAS) (detektory proti krádeži),
 - oblúkové zvaračky,
 - indukčné pece.
- Pred vstupom do prostredia, ktoré by mohlo ovplyvniť činnosť IPG nepriaznivo, vrátane priestorov, kde sú umiestnené výstražné upozornenia, aby sa zabránilo vstupu pacientov s kardiostimulátorom, kontaktujte lekára.
- **NEMANIPULUJTE** s IPG cez kožu – môže dôjsť k poškodeniu alebo odpojeniu zvodu od generátora impulzov.
- **NEMANIPULUJTE** so zvodom karotického sinusu cez kožu – môže dôjsť k poškodeniu alebo odpojeniu zvodu od IPG a/alebo k možnému poškodeniu karotického sinusu.



Úplný návod na použitie a aktuálna kópia informácií v tomto dokumente sú k dispozícii na adrese: www.cvr.com/ifu