

Instruktioner till patienten

Följande information ska tillhandahållas till patienter som ska implanteras med Barostim-systemet.


POSTOPERATIV SÅRVÅRD

- Förbandet över såret måste sitta kvar tills läkaren ger andra instruktioner.
- Var försiktig när du badar för att undvika tryck mot såret eller enheten.
- Rör INTE vid operationsområdena.
- Ligg eller tryck INTE på IPG-enheten (enheten som är implanterad i bröstet).
- Manipulera INTE IPG:n eller elektroden (enheten som är implanterad i halsen) genom huden eftersom detta kan skada enheten, vävnaden runt enheten, eller koppla loss elektroden från IPG:n.
- Feber, rodnad, utsöndringar eller kraftig smärta i operationsområdena efter tre dagar kan vara ett tecken på infektion.
 - Om du har något av ovanstående symtom ska du INTE försöka behandla det hemma. Kontakta din läkare så snart som möjligt.
 - Infektioner som upptäcks tidigt kan i allmänhet behandlas med antibiotika.
 - Allvarligare infektioner kan kräva att IPG:n och/eller elektroden tas bort.

ALLMÄN INFORMATION

- Fortsätt med läkemedel, diet, motion och livsstilsförändringar enligt instruktionerna.
- Ha med dig patientidentifikationskortet och visa det vid säkerhetskontroller.
- IPG-batteriet töms över tid och behöver bytas ut.
- Uppföljningsbesök hos läkaren krävs för att kontrollera att systemet fungerar som det ska och hur du svarar på behandlingen.
- Kontakta omedelbart din läkare för problem med:
 - stimuleringen (stickande känsla, ryckningar, talsvårigheter eller svårigheter att svälja)
 - yrsel, bröstsmärtor, andningssvårigheter, svullnad i benen
 - ovanligt lågt blodtryck eller hjärtfrekvens

VARNINGAR/FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Kontakta din läkare om du ska genomgå en medicinsk procedur:
 - Procedurer såsom MR-undersökningar, elektrokauterisering, strålbehandling, litropsibehandlingar och extern defibrillering kan skada IPG:n.
- För att undvika att behandlingen tillfälligt stoppas, håll ett avstånd på minst 15 cm (6 tum) från föremål med starka elektriska fält eller magnetfält såsom:
 - Starka magneter
 - Högtalarmagneter
 - System för elektronisk artikelövervakning (EAS) (stödlarmsdetektorer)
 - Bågsvetsar
 - Induktionsugnar
- Kontakta din läkare för vägledning innan du ska vistas i miljöer som kan ha en negativ effekt på IGP-enhetens drift, inklusive platser där varningsskyltar anger att patienter med pacemaker inte ska gå in. 
- Manipulera INTE IPG:n genom huden – detta kan skada eller dra ut elektroden från pulsgeneratoren.
- Manipulera INTE karotissinuselektroden genom huden – detta kan skada elektroden eller dra loss den från IPG:n och/eller skada karotissinus.

Full bruksanvisning och aktuell kopia av informationen i detta dokument finns på: www.cvr.com/ifu